



MIẾNG DÁN LẠNH MITOYO

1. Tên đầy đủ của sản phẩm

Miếng dán lạnh Mitoyo (Mitoyo cooling patch)

2. Thành phần

Water, glycerin, sodium polyacrylate, silicon dioxide, polyvinyl alcohol, dipropylene glycol, acrylic acid polymer sodium salt, heptane, polysorbate 80, tartaric acid, pullulan, polyacrylic acid, methylparaben, disodium EDTA, ricinus communis (castor) seed oil, magnesium aluminum hydroxide, titanium dioxide, aluminum hydroxide, hydrated silica, menthol, aluminum glycinate, CI 74160.

3. Mục đích/ chỉ định sử dụng

- Giảm sốt, hạ nhiệt
- Tác dụng làm lạnh và mát dịu với da nhờ Hydrogel thân nước liên tục trong 10 giờ.

4. Chống chỉ định

Để đảm bảo vệ sinh và hiệu quả cao nên sử dụng mỗi miếng dán một lần

5. Hướng dẫn sử dụng

- Gỡ bỏ miếng phim, dán mặt dính trực tiếp lên vùng da mong muốn (có thể cắt nhỏ để sử dụng theo kích cỡ cần thiết)
- Đặt miếng dán vào tủ lạnh trước khi sử dụng để tăng hiệu quả làm mát, không đặt vào ngăn đông.

6. Cảnh báo và thận trọng

Chỉ dùng ngoài da. Không sử dụng trên vùng da bị tổn thương, chàm, nổi mụn, vùng da trên mắt hay quanh mắt, niêm mạc.

Đôi với da nhạy cảm, nên hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ trước khi sử dụng.

Phải có sự giám sát của cha mẹ hay người lớn khi sử dụng miếng dán cho trẻ em hoặc cho người gặp khó khăn trong việc tự sử dụng

Không phủ miếng dán lên miệng hoặc mũi

Miếng dán có thể khó dính chắc vào da khi có mồ hôi, hoặc đang sử dụng bột phấn, kem dưỡng da hay các sản phẩm tương tự. Trong trường hợp này, nên rửa sạch và lau khô da trước khi dán.

Sản phẩm này không phải là thuốc. Nếu sốt kéo dài, phải liên hệ ngay với Bác sĩ.



7. Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

Ngưng sử dụng và hỏi ý kiến Bác sĩ nếu da bị kích ứng, nổi mụn nước, ứng đỏ, ngứa hay rát.

Nhà sản xuất: New Tac Kasei Co., Ltd

4148 Kamitakano Toyonaka-cho, Mitoyo-city, Kagawa, Japan

Nhập khẩu và phân phối: DHG PHARMA

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

