

Gói muối rửa mũi

ENTCLEAR Packets

Thành phần chính: Natri clorid.

Khối lượng tịnh: Gói 3,1g.

Quy cách: Hộp 20 gói.

Số lô SX:

NSX: dd/mm/yy

HSD: dd/mm/yy

Bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo thoáng mát. Hướng dẫn sử dụng và các thông tin khác: xin xem tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Xuất xứ: Đài Loan

Nhà sản xuất: Shih-Kang Medical Instruments Co., Ltd, No.13, Lane 187, Minguan Rd., Danshui District, New Taipei City 25159, Đài Loan

Chủ sở hữu số lưu hành: VPĐD Hyphens Pharma Pte.Ltd tại Hà Nội, Tầng 7, số 315 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Số lưu hành: XXXX

Packets

ENTCLEAR®

ENTCLEAR®

Packets



INSTRUCTIONS:

Add a pack of ENT CLEAR Packet to a cup of lukewarm water of about 300ml (~37°C or at a comfortable temperature). Stir to dissolve the salt, then pour the solution into the Nasal Wash, and it is ready for use.

Box of 20 packets

ENTCLEAR®

Packets



Manufactured by:
Shih Kang Medical Instruments Co., Ltd
No. 13, Lane 187, Minquan Rd., Danshui District, New Taipei City 25159, Taiwan

Distributed by:
PT Kebayoran Pharma
Jakarta-Indonesia
KEMENKES RI AKL 20704513923



Hyphens Pharma Pte Ltd
138 Joo Seng Road, 3rd Floor
368351 Singapore
www.hyphens.com.sg



0 609313 796276

<https://nhathuocngocanh.com/> **ENTCLEAR® Gói muối biển**

Mô tả:

Muối biển tự nhiên được sản xuất tại New Zealand, giàu khoáng chất và các yếu tố vi lượng. Gói muối biển ENTCLEAR® được sử dụng cùng với bình rửa mũi để rửa sạch hốc mũi.

Thành phần chính:

NaCl, các muối khoáng vi lượng. Các muối này được kết tinh hoàn toàn tự nhiên và an toàn cho sử dụng.

Không chứa bất kì thành phần thuốc hay chất bảo quản nào.

Hướng dẫn sử dụng:

Trước tiên, lấy một cốc nước ấm khoảng 300ml (Nhiệt độ khoảng 37°C hoặc nhiệt độ thích hợp với bạn). Đổ một gói muối biển ENTCLEAR® vào cốc. Khuấy để hòa tan muối nhanh và sau đó đổ cốc dung dịch này vào bình rửa mũi để sử dụng.

Tần suất sử dụng:

Để đạt được kết quả tốt nhất, sử dụng bình rửa và gói muối biển đi kèm 2 lần mỗi ngày: Sau khi đánh răng buổi sáng và buổi tối. Nếu các triệu chứng bệnh mũi nặng thì sử dụng 6-10 lần mỗi ngày.

Lưu ý:

Sử dụng nước uống còn mới để pha muối. Không nên dùng nước quá nóng. Thành phần của muối không độc hại nên nếu không may nuốt phải thì cũng không gây hại.

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM BỞI:



Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd.

Hà Nội: 7/F, 315 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân.

Tel: (84-4) 3566 8560/61/62 - Fax: (84-4) 3566 8563

TP. Hồ Chí Minh: 139F Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận.

Tel: (84-8) 3997 4462 - Fax: (84-8) 3997 4463