

ROHTO®
NoseWash

RỬA SẠCH VI KHUẨN VÀ BỤI BẮN Ô NHIỄM TỪ SÂU BÊN TRONG MŨI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SẢN PHẨM VỆ SINH MŨI
SẠCH, SÂU VÀ KHÁNG KHUẨN
ROHTO NOSEWASH

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẾN ROHTO NOSEWASH?



Khi bạn đang phải "đói đầu" với thời tiết khắc nghiệt.



Hay khi bạn có những triệu chứng bệnh về hô hấp.



Hoặc đơn giản là khi mũi bạn cảm thấy khó chịu.

Mũi là cửa ngõ đầu tiên của đường hô hấp, là nơi không khí được lọc sạch bụi và mầm bệnh, được làm ấm, làm ẩm, góp phần bảo vệ niêm mạc bên trong. Trong khi đó, Việt Nam với đặc điểm khí hậu gió mùa kết hợp môi trường ô nhiễm trầm trọng cùng xã hội công nghiệp hóa đã khiến tỉ lệ người mắc bệnh đường hô hấp ngày càng phổ biến và khó kiểm soát. Theo thống kê, người viêm xoang mũi chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng ngày càng tăng. Bệnh tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng tức thì nhưng gây rất nhiều phiền toái cho người bệnh. Nếu để kéo dài, bệnh sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm.

BÌNH VỆ SINH MŨI EASY SHOWER

- Công nghệ hiện đại từ Nhật Bản!
- Phù hợp với mọi đối tượng!
- Hình thức nhỏ gọn, tiện dụng!
- Chất liệu cao cấp và an toàn!

ROHTO NOSEWASH HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI TỪ SỰ KẾT HỢP TỐI ƯU



Rohto NoseWash mang lại hiệu quả vượt trội từ sự kết hợp tối ưu giữa bình Easy Shower và dung dịch vệ sinh mũi được sản xuất bằng công nghệ cao từ Nhật Bản.

• Bình vệ sinh mũi Easy Shower với nguyên liệu rất an toàn cho sức khỏe, không gây kích ứng, dùng được cho cả người lớn và trẻ em. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, chỉ cần bóp nhẹ dung dịch sẽ chảy thông đều qua hốc mũi và rửa sạch khoang mũi cũng như đẩy các chất dịch nhầy, vi khuẩn, bụi bẩn từ sâu bên trong ra ngoài.

• Dung dịch vệ sinh mũi Rohto NoseWash chứa muối biển Nhật Bản và dưỡng chất thiết yếu như Kẽm và Đồng, giúp sát khuẩn, kháng viêm đường hô hấp, giúp niêm mạc mũi khỏe mạnh, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về mũi như sổ mũi, ngạt mũi, viêm xoang rất hiệu quả. Đồng thời, dung dịch có pH phù hợp sinh lý khoang mũi, không gây đau khi rửa cũng như mang lại cảm giác tươi mát sáng khoái với hương bạc hà dễ chịu.



www.rohto.com.vn

Sản xuất bởi: **CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)**

Số 16 VSIP, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Đầu tư bởi:

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
OSAKA, JAPAN

Bộ phận hỗ trợ khách hàng và thông tin về cơ sở bảo hành

(028) 3822 9322

Thời gian làm việc: 8:00 ~ 17:00
(trừ ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật)

TCCL: TCSS



ROHTO®
NoseWash

RỬA SẠCH VI KHUẨN VÀ BỤI BẮN Ô NHIỄM TỪ SÂU BÊN TRONG MŨI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
SẢN PHẨM VỆ SINH MŨI
SẠCH, SÂU VÀ KHÁNG KHUẨN
ROHTO NOSEWASH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Lắp ống dẫn để đường cong của ống cùng chiều với đường cong của nắp.



Đổ dung dịch vệ sinh mũi vào bình cho đến vạch chỉ định 40 ml, vặn chặt nắp bình.



Nghiêng đầu khoảng 30 - 40 độ.



Nhẹ nhàng đặt đầu bình vào một bên cánh mũi.



Hà miệng, rồi từ từ bóp bình theo từng nhịp, dòng nước sẽ đi qua hai bên mũi, mang theo các chất nhầy, bụi bẩn trong xoang mũi ra ngoài. Trong suốt quá trình chỉ thở bằng miệng, không thở bằng mũi. Lặp lại các thao tác này với bên cánh mũi còn lại.

- Sau khi sử dụng, rửa sạch bình và bảo quản nơi khô ráo.
- Không rửa bình bằng nước quá nóng.
- Không dùng máy sấy để làm khô bình.
- Sản phẩm an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

CÁCH LẮP ỐNG DẪN KHÔNG ĐÚNG X



Đường cong của ống ngược chiều với đường cong của nắp.



Đường cong của ống vuông góc với đường cong của nắp.

THÀNH PHẦN

Sodium Chloride, Zinc Gluconate, Copper Gluconate, Coolmint, Disodium Edetate, Polysorbate 80, Benzalkonium Chloride, nước tinh khiết.

CÔNG DỤNG

- Giúp rửa sạch chất nhầy trong mũi, vệ sinh mũi sạch sẽ.
- Giúp kháng khuẩn, kháng viêm, thông mũi, dễ thở và tạo cảm giác mát dịu nhờ cơ chế rửa sạch từ sâu bên trong mũi.
- Hỗ trợ điều trị các trường hợp bị nghẹt mũi, bị cảm, viêm xoang và viêm mũi dị ứng.
- Giảm những triệu chứng kích thích ở mũi do các nhân tố gây hại như vi khuẩn, không khí ô nhiễm, phấn hoa, bụi bẩn.

BẢO QUẢN

Bảo quản nơi khô mát, dưới 30 °C, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp.

SỐ LÔ/ NSX

Xem trên bao bì.

HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng trong các trường hợp: viêm tai, vừa phẫu thuật tai, mũi đang bị tắc hoàn toàn hoặc tắc nghẽn tai, rối loạn nuốt.
- Không ngứa mắt khi dùng.
- Không nên sử dụng chung bình vệ sinh mũi với người khác.
- Kiểm tra định kỳ bình, nắp và ống để đảm bảo mọi thứ đều sạch, không bị biến màu hoặc rạn nứt. Nếu có bất kỳ dấu hiệu hay vấn đề, hãy thay bộ sản phẩm mới.
- Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng trong trường hợp đã từng phẫu thuật tai hoặc viêm xoang gần đây.
- Nếu cảm thấy bị áp lực trong tai hay mũi khi sử dụng, hãy ngừng và hỏi ý kiến bác sĩ.
- Trẻ em sử dụng dưới sự hướng dẫn của người lớn.
- Nên dùng sản phẩm 1 tiếng trước khi đi ngủ, nhằm tránh phần dung dịch thừa chảy xuống cổ họng.