

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ FLEXORIN GEL

Miêu tả & quy cách đóng gói

Mỗi hộp chứa 01 tuýp gel 30ml/100ml

Thành phần:

Arnica Montana, Boswellia Serrate, Vitamin E, Menthol, Methyl Salicylate, Dimethyl Sulfone, Acetyl Glucosamine, Hyaluronic Acid, Chondroitin Sulfate

Tác dụng & cách sử dụng

FLEXORIN GEL là gel xoa ngoài da giúp giảm đau cơ xương khớp. FLEXORIN GEL có tính phân cực nên được sử dụng như một loại gel cho các máy siêu âm hay trong các liệu pháp TECAR và IONTOPHORESIS, massage trị liệu.

Mở nắp tuýp, xoa gel lên bề mặt da và massage nhẹ nhàng khu vực cần điều trị đến khi gel được hấp thu hoàn toàn. Sử dụng 2-3 lần/ngày.

Chống chỉ định

Chỉ sử dụng bởi cán bộ chuyên môn. Không sử dụng khác với khuyến cáo của nhà sản xuất. Không sử dụng nếu bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thiết bị.

Cảnh báo và thận trọng

Tránh tiếp xúc với mắt và vết thương hở. Rửa sạch tay sau khi sử dụng. Không dùng nếu sản phẩm đã hết hạn. Không dùng nếu hộp bị vỡ, méo móp và tuýp không còn nguyên vẹn.

Bảo quản: Bảo quản nhiệt độ phòng (5⁰C - 45⁰C)

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Nhà sản xuất (chủ sở hữu sản phẩm): GMED PHARMA s.r.l

Địa chỉ: Via Marco Polo- C.da Lecco 87036 - Rende (CS), Italia

Xuất xứ: Italia

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH

