

GEL-KIDDY

Gel thụt nhuận tràng

THÀNH PHẦN:

Glycerin, Sorbitol, Propylene glycol, Aloe vera extract (Chiết xuất Lô hội), vitamin B5, PEG-40 hydrogenate castor oil, vitamin E, Sodium benzoate, Nước tinh khiết vừa đủ.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

- Thêm dịch vào đại tràng, thúc đẩy thải phân khi táo bón.
- Làm ẩm và làm mềm phân, giúp đi vệ sinh dễ dàng hơn, hạn chế chảy máu hậu môn.
- Thích hợp để hỗ trợ điều trị ngắn hạn cho người bị táo bón không thường xuyên, giúp cho việc bài tiết nhanh, dễ dàng hơn.

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG:

Điều trị chứng táo bón do các nguyên nhân ở vùng trực tràng và hậu môn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Nằm nghiêng người qua một bên, mông kê cao hơn người một chút. Chân trên co lại, chân dưới thẳng bình thường
- Tháo nắp lọ Kiddy, bóp thêm 1 - 2 giọt vào hậu môn.
- Đút nhẹ nhàng đầu lọ Kiddy vào trực tràng, bóp mạnh đẩy hết dịch trong lọ vào trực tràng. Trong khi rút đầu lọ ra vẫn bóp để giữ lọ.
- Dùng 1 - 2 lọ thụt trong vòng 24h.

QUY CÁCH: Hộp 6 tuýp x 9gam

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.
- Không dùng dung dịch thụt rửa cho những bệnh nhân bị trĩ cấp, đau và có chảy máu.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Kiểm tra bao bì sản phẩm trước khi sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao bì thiết bị y tế bị hư hỏng.

THỜI HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.

BẢO QUẢN:

- Để nơi khô mát ($\leq 30^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng trực tiếp.
- Để xa tầm tay trẻ em.

SỐ CB: 200000032/PCBA-HN



- Hiệu quả
- Mềm mại
- Tiện dụng

