

HemoClin® dạng gel

- Việc làm lạnh tức thì làm giảm bệnh Trĩ, sự khó chịu ở hậu môn (như kích ứng, ngứa, nóng rát, nhạy cảm).
- Phòng ngừa bệnh Trĩ và nứt hậu môn
- Điều trị và phòng ngừa các khó chịu ở hậu môn
- Tác động lên da và hỗ trợ quá trình làm lạnh một cách tự nhiên.

Vui lòng đọc kỹ tờ Hướng Dẫn Sử Dụng trước khi bạn bắt đầu dùng HemoClin®. Không vứt bỏ tờ Hướng dẫn sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hay nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì, hãy hỏi ý kiến của Bác Sĩ hoặc Dược Sĩ.

Nội dung chính trong tờ Hướng dẫn sử dụng:

1. HemoClin® được dùng để làm gì?
2. HemoClin® bao gồm những thành phần gì?
3. Thành phần hoạt tính trong sản phẩm hoạt động như thế nào?
4. Những gì bạn nên biết trước khi dùng HemoClin®?
5. Khi nào bạn nên dùng HemoClin® và dùng như thế nào?
6. Cách bảo quản
7. Đóng gói
8. Thông tin liên hệ

1. HemoClin® được dùng để làm gì?

HemoClin® điều trị các khó chịu ở hậu môn và được dùng để làm giảm các triệu chứng như kích ứng, ngứa, bỏng rát và sự nhạy cảm có liên quan đến bệnh Trĩ.

HemoClin® vừa phòng ngừa vừa điều trị khó chịu ở hậu môn. Bệnh Trĩ và các vấn đề khó chịu khác ở hậu môn rất thường gặp ở Phụ Nữ mang thai và mới sinh nở.

2. HemoClin® chứa những thành phần gì?

HemoClin® chứa 37 gram gel với thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên. HemoClin® chứa phức hợp 2QR được chiết xuất từ cây Aloe Barbadensis, cùng những thành phần khác giúp làm lạnh và bôi trơn. Sản phẩm này không có mùi và không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật.

3. Cơ chế tác dụng?

HemoClin® hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị các khó chịu ở hậu môn như ngứa, kích ứng, bỏng rát và nhạy cảm. Gel HemoClin® giúp giảm nhanh Trĩ và các khó chịu hậu môn, nứt hậu môn. HemoClin® gel giúp làm lạnh tức thì khi dùng cũng như là bôi trơn giúp cho việc đi cầu (tiêu) dễ dàng. Gel HemoClin® hình thành rào cản vật lý để ngăn vi khuẩn bám vào mô. Gel HemoClin® thúc đẩy quá trình làm lạnh tự nhiên.

Thành phần:

Nước, gel Aloe Barbadensis, Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethyl- hexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate. * 2QR



4. Những gì bạn nên biết trước khi dùng HemoClin®?

HemoClin® không chứa bất kỳ hoá chất độc hại nào. Không có bất kỳ tác dụng phụ được ghi nhận trong thời gian sử dụng HemoClin®.

Hãy trao đổi với Bác sĩ của bạn nếu:

Bạn liên tục phải chịu đựng cơn đau do Trĩ hay bạn bị chảy quá nhiều máu.

Sử dụng các loại thuốc khác:

Được ghi nhận không tương tác với các loại thuốc khác.

5. Khi nào bạn nên dùng HemoClin® và dùng như thế nào?

Dùng để điều trị các khó chịu ở hậu môn (như ngứa, kích thích, bỏng rát, nhạy cảm):

Dùng một lượng gel nhiều bơm vào bên trong và thoa xung quanh vùng cần điều trị ít nhất 2 lần một ngày trong 2 tuần liên tục hoặc cho đến khi thấy bệnh thuyên giảm rõ rệt. Sử dụng đều đặn và thường xuyên sẽ làm tăng hiệu quả điều trị.

Dùng để phòng ngừa bệnh Trĩ (Trĩ nội và Trĩ ngoại) và nứt hậu môn:

Tra bên trong và xung quanh vùng hậu môn trước và sau mỗi lần đi tiêu.

Bóp một lượng nhỏ gel HemoClin® lên ngón tay. Thoa vào bên trong và xung quanh ống hậu môn cho đến khi thấy đủ.

Hãy chắc chắn bạn đóng nắp tuýp HemoClin® sau khi sử dụng để giữ cho gel không bị khô.

Không nên dùng HemoClin® liên tục trong hơn 30 ngày cho mỗi đợt điều trị.

Không dùng HemoClin® nếu bạn nhạy cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm.

6. Bảo quản

HemoClin® nên được giữ ở trong phòng. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Hạn sử dụng ghi trên đầu tuýp và hộp.

7. Thành phần

- 1 tuýp 37 gram chứa gel HemoClin®
- Tờ thông tin hướng dẫn sử dụng
- Ống thông (bơm)

Thận trọng:

Đề xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:

Trimb Healthcare, Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Hà Lan.

Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam:

 Công Ty TNHH Chăm Sóc Khoẻ & Đẹp Việt Nam, 40/19 Bàu Cát 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam.

Thông tin thêm về HemoClin, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số: (028) 62962262

www.hemoclin.vn