


Khi nào thì nên dùng Ritex Kinderwunsch Conception Lubricant?



Chất bôi trơn có hiệu quả tức thì và có thể bôi ngay trước khi giao hợp. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, hãy xé lỗ thủng của túi bảo vệ. Tháo dụng cụ bôi và đậy lại túi bảo vệ bằng khóa kéo cẩn thận.

Xin lưu ý rằng nội dung của túi bảo vệ chỉ có thể được sử dụng trong tối đa ba tháng sau khi mở. Trước khi sử dụng

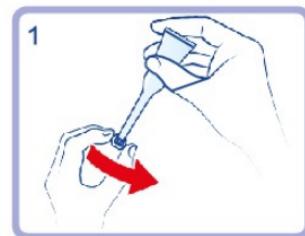


Tháo nắp bảo vệ khỏi dụng cụ bôi (1) và loại bỏ. Vui lòng không sử dụng dụng cụ bôi nếu nắp bảo vệ bị hỏng hoặc bị mất. Dụng cụ bị lỗi phải được loại bỏ và phải sử dụng một dụng cụ mới thay thế.


Ngày rụng trứng

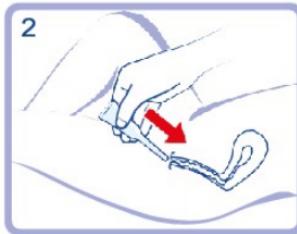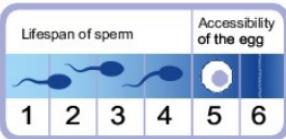

Vui lòng sử dụng dụng cụ bôi ở tư thế nằm để chất bôi trơn có thể được loại bỏ và đưa vào một cách tối ưu.

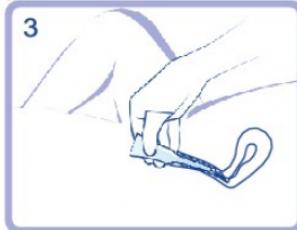

Giữ dụng cụ bôi ở khu vực giữa của ống bằng ngón tay cái và các ngón tay, sau đó đưa đầu móng vào âm đạo một cách cẩn thận (2).

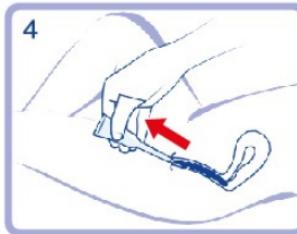

Sau đó kéo dụng cụ bôi ra khỏi âm đạo và tiếp tục bóp ống để không có dịch tiết âm đạo bị hút vào (4).

Vui lòng vứt bỏ dụng cụ đã sử dụng. Các ứng dụng được thiết kế rõ ràng chỉ để sử dụng một lần.

Ritex Kinderwunsch Conception Lubricant có thể để lại vết bẩn trên hàng dệt khó giặt sạch. Chất bôi trơn không được phép tiếp xúc với mắt, vì lớp màng bôi trơn có thể làm mờ thị lực tạm thời.

Tránh xa tầm tay trẻ em

Cũng xin lưu ý các ký hiệu thông tin sau trên bao bì:
Vui lòng lưu ý hướng dẫn chi tiết trong tờ rơi gói này..

- ☒ Vì lý do vệ sinh, chỉ sử dụng mỗi đầu bôi một lần.
- ☒ Tránh xa ánh nắng trực tiếp và nhiệt.
- ☒ Bảo quản nơi khô ráo.
- ☒ Ngày hết hạn. Không sử dụng các ứng dụng đã quá hạn sử dụng.

- Số Lô
 Mã hàng Ritex
 Nhà sản xuất

Đóng gói:
8 dụng cụ sử dụng một lần và 4 ml trong một túi zip có nắp đậy..

Thành phần: Dimethicone Ph.Eur.

Ritex GmbH
 Gustav-Winkler-Straße 50
 33699 Bielefeld · Germany
www.kinderwunsch-lubricant.com

Dated: July 2016
R MAT. NO. 5721530716