



BENOSTAN

NATURE'S TREATMENT

BENOSTAN HEALTH PRODUCTS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN ĐẶT TRỰC TRÀNG PHYTOROID SUPPOSITORIES

Mô tả sản phẩm

Viên đạn đặt trực tràng Phytoroid Suppositories là sản phẩm thiết bị y tế mà công thức được tạo thành nhờ sự kết hợp các chất có nguồn gốc thực vật để điều trị tại chỗ - Làm dịu và mềm da tại vùng hậu môn. Hỗ trợ giảm các triệu chứng của trĩ như: đau, sưng, ngứa. Hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương vùng hậu môn.

Thành phần

Hard Fat, Polyoxyethylene (25) Cetyl Stearyl Ether, Sáp ong, Dầu hạt hướng dương, Chiết xuất Cây Ban Âu, Chiết xuất lá Cây Xô Thơm, Cúc Calendula, Nhũ hương, BHT.

Chỉ định

Làm dịu và mềm da tại vùng hậu môn. Hỗ trợ giảm các triệu chứng của trĩ như: đau, sưng, ngứa. Hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương vùng hậu môn

Dùng cho các trường hợp:

- Nứt kẽ hậu môn
- Trĩ không xuất huyết
- Sau cắt bỏ búi trĩ hoặc điều trị trĩ bằng lase.
- Bị trĩ trong thời kỳ mang thai hoặc sau sinh

Cách sử dụng viên đặt trực tràng Phytoroid Suppositories

- Rửa sạch tay với nước và xà phòng.
- Làm sạch vùng hậu môn. Tách viên đặt ra và đặt vào vùng trực tràng.
- Ngày đặt 1 viên.

Không sử dụng nếu sản phẩm bị hư hại hoặc không còn nguyên vẹn. Nên xé một dải đựng viên đạn theo vạch chia và bóc để lấy viên đạn ra.

Thận trọng

- Chỉ dùng đặt trực tràng.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không được nuốt.
- Không sử dụng nếu bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng trong trường hợp trĩ xuất huyết.

Tác dụng phụ: Không có báo cáo về tác dụng phụ.

Tương tác: Không có bất kỳ tương tác được biết đến với chế phẩm khác.

Hạn sử dụng và bảo quản

- 36 tháng nếu bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C.
- Bảo quản nơi khô, mát dưới 25°C để tránh bị chảy. Có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Quy cách: Hộp 10 viên đạn đặt trực tràng. **Thiết bị y tế nhóm B.**

Sản xuất tại Hy Lạp bởi:

