

PHYSIOMER®

**Nước biển tự nhiên 100% vô trùng
dùng thông rửa hốc mũi**

PHYSIOMER® Normal Jet (Gentle Jet)

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên

PHYSIOMER® Baby (Tia phun sương)

Sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

PHYSIOMER® Strong Jet (Tia phun mạnh)

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên

Sử dụng chăm sóc sau khi phẫu thuật

Mũi bảo vệ hệ hô hấp bằng cách lọc không khí hít vào. Thói quen làm vệ sinh mũi mỗi ngày giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng (TMH) thông thường. Điều này đặc biệt đúng đối với cơ địa dễ viêm nhiễm và dị ứng một số tác nhân nguy hại như khói thuốc lá, môi trường ô nhiễm ...

PHYSIOMER® là sérum sinh lý gốc từ nước biển có chứa toàn bộ các hoạt chất và muối khoáng sinh học tự nhiên có sẵn trong nước biển

Thành phần cấu tạo

Sérum biển PHYSIOMER® là 100% nước biển tự nhiên đã qua hệ thống siêu lọc và khử bớt muối

- Có các nguyên tố vi lượng và độ muối gần giống với huyết tương giúp cho sự tái tạo tế bào
- Đẳng trương pH phù hợp với cơ chế sinh lý của hốc mũi
- Vô trùng và không chứa chất bảo quản

Đặc tính


- Rửa sạch và làm thông thoáng hốc mũi
- Làm sạch dịch nhầy đóng nghẹt trong mũi
- Làm dịu chứng sung huyết và giúp tái lập việc thở bằng mũi
- Giúp cho sự tái tạo của tế bào

Khi nào sử dụng PHYSIOMER®

- Vệ sinh mũi trong trường hợp cúm, viêm mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang mũi, viêm xoang, viêm mũi họng..., xịt vào trong hai hốc mũi 2 đến 4 lần mỗi ngày, nhiều hơn nếu cần thiết
- Vệ sinh mũi thường xuyên
- Xịt vào trong hai hốc mũi một lần mỗi ngày

Cách sử dụng PHYSIOMER® Normal Jet và Strong Jet

- Mở nắp đậy và gắn đầu phun tia vào chai
- Nghiêng đầu sang một bên, ngậm miệng lại
- Xịt Physiomer vào lỗ mũi phía bên trên trong vòng vài giây cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới
- Hỉ mũi
- Lặp lại thao tác này cho lỗ mũi bên kia

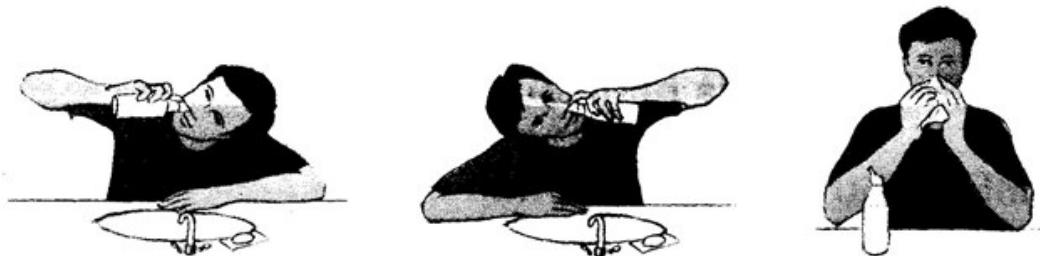

Cách sử dụng PHYSIOMER® Baby

- Mở nắp đậy và gắn đầu phun tia vào chai
- Nghiêng đầu bé sang một bên
- Xịt Physiomer vào lỗ mũi phía bên trên trong vòng vài giây cho đến khi nước chảy xuống lỗ mũi bên dưới
- Đỡ bé dậy, giúp bé ho và chìu mũi cho bé
- Lặp lại thao tác này cho lỗ mũi bên kia



Bảo quản

- Rửa và lau khô đầu phun tia sau mỗi lần sử dụng
- Không để lạnh, nhiệt độ không quá 35°C
- Không được sử dụng sau thời hạn ghi trên vỏ hộp

PHYSIOMER® là một chế phẩm y tế **CE 0459** phù hợp tiêu chuẩn Quy định 93/42 của **Cộng Đồng Châu Âu**.

Nhà sản xuất

Laboratoire de la Mer Sas
F-35400 SAINT-MALO / FRANCE
<http://www.physiomer.com>