

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEST NHANH BIOMERICA COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

DỤNG CỤ ĐI KÈM

- 1 Khay Xét nghiệm trong túi
- 2 Ống chứa mẫu phẩm có chứa dung dịch
- 3 Que tăm
- 4 HDSD
- 5 Khay đựng

BƯỚC 1 THU THẬP MẪU

Khay xét nghiệm kháng nguyên Biomerica COVID-19 Antigen xét nghiệm bằng tăm bông bệnh phẩm. Chỉ sử dụng dung dịch đệm và ống xét nghiệm trong bộ dụng cụ để thực hiện xét nghiệm các mẫu thử.

Lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi họng:

- 1 Đưa que lấy mẫu tiết trùng vào mũi của bệnh nhân, đưa vào phần sau của vòm mũi họng
- 2 Xoay que thử ít nhất 2 lần
- 3 Từ từ rút que thử ra khỏi khoang mũi

Lấy mẫu xét nghiệm dịch mũi:

- 1 Lấy que thử ra khỏi giấy bọc. Đưa que lấy mẫu vào mũi khoảng 2cm
- 2 Từ từ quay que thử khoảng 5-10 lần vào vùng trong mũi
- 3 Rút que thử ra và lặp lại ở mũi còn lại

BƯỚC 2 CHUẨN BỊ MẪU

Mẫu mới thu thập cần được xét nghiệm sớm nhất có thể. Nếu không thử tiến hành xét nghiệm mẫu ngay lập tức thì mẫu chỉ có thể để ở nhiệt độ phòng trong vòng 2 giờ (15° - 30°C) hoặc để được 24 giờ ở nhiệt độ 2° - 8°C. KHÔNG CẤP ĐÔNG MẪU BỆNH PHẨM.

- 1 Mở phần nắp của ống đựng và lật bỏ phần giấy bọc
- 2 Đưa que chứa mẫu vào ống đệm tách chiết. Vừa ấn đầu bông thử xuống đáy ống, xoay que thử khoảng 10 giây để đưa kháng nguyên vào ống nghiệm
- 3 Bóp vào đầu que thử khi đưa ra khỏi ống để rút hết các dung dịch khỏi đầu que thử
- 4 Đậy chặt nắp của ống nghiệm
- 5 Lắc nhẹ khoảng 2-3 lần. Không vortex

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEST NHANH BIOMERICA COVID-19 ANTIGEN RAPID TEST

DỤNG CỤ CẦN THIẾT NHƯNG KHÔNG ĐI KÈM



1

Đồng hồ



2

Dụng cụ bảo vệ cá nhân như găng tay, khẩu trang, kính và áo khoác



3

Thùng chứa chất thải nguy hiểm sinh học và chất khử trùng

BƯỚC 3 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TEST

Nếu khay xét nghiệm được bảo quản ở nhiệt độ 2° - 14°C thì để khay xét nghiệm và dung dịch đệm chiết xuất ở nhiệt độ phòng (15° - 30°C) khoảng 30 phút trước khi xét nghiệm. Sử dụng dụng cụ thử nghiệm trong vòng 1 giờ sau khi se túi đựng. Không sử dụng mẫu cấp đông khi xét nghiệm bằng dụng cụ này

1

Bóc túi đựng khay thử xét nghiệm



2

Đặt khay thử lên bề mặt phẳng. Đặt thời gian 15 phút



3

Nhỏ từ ống nghiệm 3 giọt vào giếng chứa mẫu và bắt đầu bấm thời gian. Không được di chuyển giếng chứa mẫu (S) trong thời gian này



4

Chờ kết quả sau 15 phút. Không được đọc kết quả sau 20 phút




BƯỚC 4 ĐỌC KẾT QUẢ

DƯƠNG TÍNH


Nếu mẫu phẩm chứa kháng nguyên SAR-CoV-2, cửa sổ xét nghiệm sẽ xuất hiện 2 vạch: 1 vạch màu hồng/đỏ cạnh vùng "T" và 1 vạch màu xanh dương cạnh vùng "C".

Lưu ý: Bất cứ vạch đậm hay mờ màu hồng/đỏ bên cạnh chữ "T" được coi là dương tính

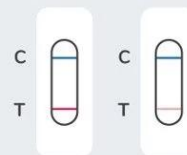

ÂM TÍNH

1 vạch duy nhất màu xanh dương xuất hiện bên cạnh vùng "C". Không có vạch màu hồng/đỏ xuất hiện bên cạnh vùng "T".

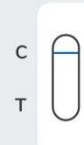

KHÔNG HỢP LỆ

Không vạch màu bên cạnh chữ "C" và không có bất kể sự xuất hiện của dải màu bên cạnh chữ "T".

Lưu ý: Không đủ khối lượng mẫu, là lý do phổ biến nhất dẫn đến kết quả không hợp lệ. Mẫu phải được thử lại bằng khay thử mới.

