

Repaherb

Mỡ thoa trực tràng



Hướng dẫn sử dụng



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì tờ hướng dẫn sử dụng chứa các thông tin quan trọng cho người dùng.

Sản phẩm này là một thiết bị y tế được dùng cho người lớn, và cần được sử dụng theo đúng hướng dẫn nhằm đạt hiệu quả tối đa.

Giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể cần phải xem lại nó.

Thành phần:

Sucralfat, bơ ca cao, lanolin (nguồn gốc thực vật), vaseline trắng, sáp ong trắng, nước tinh khiết, caprilil glycol, chiết xuất cúc xu xi (calendula-extract), chiết xuất cúc La Mã (chamomile extract), chiết xuất lá cây Phỉ (witch hazel leaf extract).

Dạng của thiết bị y tế

Mỡ thoa trực tràng. Mỗi tuýp chứa 25 gam mỡ thoa trực tràng.

Mỗi hộp giấy chứa: Một tuýp mỡ thoa và một dụng cụ bôi bằng nhựa để gắn vào tuýp.

Mỡ thoa trực tràng Repaherb là gì và được dùng để làm gì?

Mỡ thoa trực tràng Repaherb được dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của nó (ví dụ: eczema, nứt hậu môn). Nó bao phủ và bảo vệ lớp biểu bì, chăm sóc cho da bị viêm, ngứa, giúp thúc đẩy tái tạo da.

Mỡ thoa trực tràng Repaherb làm giảm sự khô da, nhờ đó giúp làm lành vết thương, làm giảm nguy cơ nứt và tổn thương khi đi đại tiện.

Khi nào bạn nên tránh dùng mỡ thoa trực tràng Repaherb?

Không sử dụng nếu bạn quá mẫn cảm với lanolin hoặc bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm này.

Không dùng cho bệnh nhân trĩ xuất huyết.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Việc sử dụng mỡ thoa trực tràng Repaherb trong thời gian có thai và cho con bú không phải là chống chỉ định, nhưng khuyến cáo nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trong những trường hợp này.

Tương tác với các chế phẩm khác

Chưa quan sát thấy tương tác giữa mỡ thoa trực tràng Repaherb với các chế phẩm khác, do đó nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này cùng với các chế phẩm khác dùng cho trực tràng.

Sử dụng đồng thời mỡ thoa trực tràng với bao cao su có thể làm giảm độ an toàn của việc tránh thai.

Sử dụng mỡ thoa trực tràng Repaherb như thế nào?

Luôn luôn sử dụng sản phẩm theo đúng hướng dẫn trong tờ Hướng dẫn sử dụng.

Khi sử dụng theo cách khác với mô tả trong Hướng dẫn sử dụng, có thể không cải thiện được các triệu chứng bệnh, hoặc có thể gây kích ứng.

Rửa tay trước khi sử dụng mỡ thoa trực tràng Repaherb.

Liều khuyến cáo như sau: thoa xung quanh vùng hậu môn, có thể sau khi đi đại tiện và vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn, hoặc cho một lượng nhỏ mỡ thoa (bằng hạt đậu) vào trực tràng bằng cách dùng dụng cụ bôi. Bạn phải chắc chắn rằng tuýp mỡ thoa và dụng cụ bôi được nối với nhau đúng cách.

Trước khi sử dụng, kiểm tra để chắc chắn rằng bao gói sản phẩm còn nguyên vẹn, lượng sản phẩm trong tuýp còn đầy và cả tuýp và dụng cụ bôi đều không bị hỏng.

Không sử dụng nếu hộp hoặc tuýp mỡ thoa, dụng cụ bôi thuốc bị hỏng.

Rửa dụng cụ bôi bằng nước ấm và xà phòng và vệ sinh nắp tuýp mỡ thoa trực tràng Repaherb sau khi sử dụng.

Luôn luôn rửa tay sau khi dùng mỡ thoa trực tràng Repaherb. Nên sử dụng chế phẩm một hoặc hai lần mỗi ngày.

Dụng cụ bôi chỉ dùng cho một người.



Không để sản phẩm tiếp xúc với mắt và xung quanh mắt, miệng và niêm mạc miệng. Nếu sản phẩm bị dính vào các vùng trên của cơ thể, hãy lau hoặc rửa sạch.

Mỡ thoa có thể làm bẩn quần lót, do đó bạn nên sử dụng băng vệ sinh hoặc tã lót.

Thời gian sử dụng phụ thuộc vào sự cải thiện của các triệu chứng, nhưng có thể sử dụng sản phẩm 4 tuần liên tục. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng không cải thiện trong vòng 1-2 tuần.

Tác dụng phụ

Việc sử dụng các chế phẩm tác dụng tại chỗ – đặc biệt khi dùng kéo dài – có thể dẫn tới các phản ứng quá mẫn, các triệu chứng bao gồm cảm giác bỏng rát, ngứa, đau, ban đỏ. Nếu bạn gặp phải các triệu chứng này khi sử dụng sản phẩm, ngưng điều trị và tham khảo ý kiến bác sĩ.


Nếu bạn gặp phải bất kỳ phản ứng phụ nào khác chưa được liệt kê trong tờ Hướng dẫn sử dụng, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Cảnh báo

Để xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em! Tránh tiếp xúc với mắt! Không được nuốt sản phẩm!
Không được sử dụng mỡ thoa trực tràng Repaherb trong âm đạo.

Hạn dùng và điều kiện bảo quản

Hạn dùng được ghi trên vỏ hộp và tuýp sản phẩm. Hạn dùng và số lô sản xuất được ghi trên mép hàn của tuýp. Không dùng sản phẩm sau ngày hết hạn. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

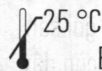

Bảo quản mỡ thoa trực tràng Repaherb ở nhiệt độ không quá 25°C.



Tránh ánh sáng.

Không vứt bỏ bất kỳ thiết bị y tế nào vào nước thải hoặc rác thải hộ gia đình. Tham khảo ý kiến dược sĩ cách hủy bỏ sản phẩm khi không còn sử dụng. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Tờ hướng dẫn sử dụng này được cập nhật vào:
Tháng 3 năm 2017

Thiết bị y tế



Nhà sản xuất:

Egis Pharmaceuticals PLC

Trụ sở: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., Hungary

Nhà máy: 9900 Körömend, Mátyás király u. 65., Hungary

Chú thích các biểu tượng trên bao bì

	Thận trọng! Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
	Các hướng dẫn tham khảo khi sử dụng
	Không dùng nếu bao gói sản phẩm không còn nguyên vẹn
	Giới hạn nhiệt độ
	Tránh ánh sáng
	Nhà sản xuất
	Số lô sản xuất
	Hạn dùng

Egis Doc. No.: 39921/V

