

BETAPlast™ H

1. Mô tả

- Betaplast H là loại băng vết thương hydrocolloid mỏng và mềm dẻo.
- Betaplast H dễ dàng áp sát bề mặt vết thương do khả năng tự kết dính và dễ dàng thay băng.
- Betaplast H phù hợp để điều trị các vết thương có dịch tiết từ mức độ ít đến trung bình.
- Betaplast H hấp thụ dịch tiết từ vết thương và kích thích sự lành vết thương trong khi vẫn duy trì môi trường ẩm thuận lợi cho quá trình lành vết thương so với điều kiện khô thông thường.

2. Chỉ định

- ① Loét do tỳ đè
- ② Loét chân
- ③ Loét do đái tháo đường
- ④ Vết thương do chấn thương
- ⑤ Vết rách
- ⑥ Các vết thương cho ghép da
- ⑦ Bỏng
- ⑧ Vết thương sau phẫu thuật
- ⑨ Vết thương ngoại khoa hở
- ⑩ Loét do tắc tĩnh mạch
- ⑪ Vết thương cấp tính
- ⑫ Tổn thương da do trượt
- ⑬ Các rối loạn về da

3. Hướng dẫn sử dụng

- ① Làm sạch vết thương và để khô hoàn toàn.
- ② Tháo Betaplast H ra khỏi bao bì và cắt thành miếng lớn hơn kích thước vết thương.
- ③ Đặt miếng Betaplast H lên vết thương và ấn nhẹ nhàng để cố định.

- ④ Khi đã thấm dịch tiết, Betaplast H sẽ chuyển qua màu trắng và phồng lên. Giữ băng trong 2-3 ngày để chứa dịch tiết.
- ⑤ Khi băng không phồng lên nữa hoặc nếu có rò rỉ dịch tiết, thay băng mới.
- ⑥ Tháo băng bằng cách bóc từ từ ở một góc băng.

4. Thận trọng

- Chỉ sử dụng một lần.
- Ngừng sử dụng nếu xảy ra hiện tượng đỏ hoặc quá mẫn.
- Không sử dụng nếu bao bì hoặc túi bị rách.

5. Hạn dùng

- 3 năm kể từ ngày sản xuất.

6. Điều kiện bảo quản và vận chuyển

- Bảo quản nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng.
- Tránh nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao.

7. Tác dụng có hại

- Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo tác dụng có hại của sản phẩm.

Quy cách: Túi 1 miếng dán hoặc hộp 10 túi x 1 miếng dán.

1 miếng dán kích thước 10cm x 10cm x 0,03cm.

Mỗi miếng gồm màng polyurethane (lớp bảo vệ) và keo thấm hút nước hydrocolloid (lớp hấp thụ).

Số lô, HD: xin xem **LOT**  trên bao bì.

NSX: 3 năm trước ngày hết hạn in trên bao bì.

Nhà sản xuất : GENEWEL CO., LTD.

281-2, Soltaesangdu-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Hàn Quốc

Nhà nhập khẩu: VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG, lô 18 L1-2, VSIP II, đường số 3, KCN Việt Nam-Singapore 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

