

# Cationorm®



## Nhũ tương nhỏ mắt, ống đơn liều

### 1. Thành phần

Dầu khoáng (Mineral oils), glycerol, tyloxapol, poloxamer 188, tris hydroclorid, tromethamin, cetalkonium clorid và nước pha tiêm.

### 2. Mô tả

**Cationorm®** là nhũ tương hình thành bởi một pha nước và một pha dầu. Thành phần chính của pha dầu là dầu khoáng (mineral oils).


**Cationorm®** với công thức tiên tiến không những phục hồi độ ẩm mà còn giúp ngăn ngừa mất nước.

Các sản phẩm nước mắt nhân tạo thông thường chỉ đơn thuần cung cấp thêm độ ẩm mà có thể bị bay hơi nhanh chóng từ bề mặt mắt.

### 3. Công dụng

**Cationorm®** là nhũ tương dưỡng ẩm và bôi trơn có tác dụng bảo vệ bề mặt mắt và làm giảm sự khó chịu và kích ứng do khô mắt gây ra bởi việc sử dụng kính áp tròng lâu ngày hay bởi điều kiện môi trường.

#### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

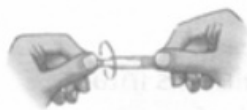

- Rửa và lau khô tay thật kỹ.
- Trước khi sử dụng, phải đảm bảo ống nhũ tương nhỏ mắt còn nguyên vẹn.
- Lấy một ống nhũ tương và lắc trước khi sử dụng.
- Vặn gãy đầu ống để mở.
- Nhỏ 1 hoặc 2 giọt khi cần hoặc theo lời khuyên của chuyên gia.
- Tránh tiếp xúc với mắt.



#### 4. Điều kiện bảo quản

- Bảo quản không quá 30°C.
- Không để đông đá.

#### 5. Cảnh báo

- Chỉ dùng cho mắt.
- Không sử dụng nếu mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không được nuốt sản phẩm.
- Để xa tầm với và tầm nhìn của trẻ em.
- Nếu dùng đồng thời với các sản phẩm nhỏ mắt khác, nên đợi ít nhất 5 phút giữa các lần dùng. Khuyến cáo dùng Cationorm® cuối cùng.
- Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn.
- Sản phẩm không chứa chất bảo quản. Do đó, sau khi mở ống và sử dụng sản phẩm, bỏ lượng nhũ tương còn thừa, nếu có.

#### 6. Tác dụng không mong muốn

Trong rất hiếm các trường hợp, có thể xuất hiện khó chịu thoáng qua như: kích ứng mắt, đau mắt, cảm giác có vật lạ trong mắt, đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt, cảm giác nóng rát mắt, nhìn mờ tạm thời, viêm mí mắt hay phù nề mí mắt. Những triệu chứng này cũng là một phần của các triệu chứng điển hình của bệnh khô mắt có liên quan đến bệnh tiềm ẩn hiện có trong mắt của bệnh nhân bị khô mắt.

**NẾU XẢY RA BẤT KỲ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN NÀO KHÔNG ĐƯỢC LIỆT KÊ TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG THÔNG BÁO CHO BÁC SỸ HAY DƯỢC SỸ.**

**Quy cách đóng gói:** Hộp 30 ống đơn liều 0,4 ml

**Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất

**Xuất xứ:** Pháp

**Sản xuất bởi:**

EXCELVISION

Z.I. La Lombardière - 27 rue de la Lombardière

07100 Annonay Cedex - Pháp

**Theo giấy phép của:**

Santen SAS

1 rue Pierre Fontaine

Bâtiment Genavenir IV

91000 Evry - Pháp

**Công ty nhập khẩu:** Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương

Số 18 L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore 2, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Dựa trên PI 2015 Malaysia và Singapore và thông tin an toàn cập nhật tháng 10 năm 2015 .

CAT-02/151015