



Sản phẩm dán mụn ĐUY NHẤT có tinh chất lô hội

# Himom Band

premium

Hộp 3 vỉ x 12 miếng

**Dùng cho**

- ✦ Mụn bọc có mũ
- ✦ Mụn có nhân
- ✦ Mụn trứng cá to
- ✦ Tấy nốt ruồi
- ✦ Che mụn khi trang điểm

## CÔNG DỤNG:

HIMOM dùng được cho người da nhiều mồ hôi hoặc da phải tiếp xúc với nước, giúp bảo vệ và làm nhanh lành mụn cho các trường hợp:

- Mụn bọc có mũ, mụn có nhân, mụn trứng cá to.
- Nốt ruồi sau khi tẩy
- Vết sưng tấy mọng đỏ
- Che vết mụn khi trang điểm

## CÁCH DÙNG:

- Dùng 1 miếng/1 vị trí mụn, bao gồm cả mụn chưa vỡ và đã vỡ có dịch.
- Dùng 1 miếng cho đến suốt 48h hoặc khi rửa mặt sau trang điểm
- Khi miếng dán hút dịch tiết phòng gán hết kích thước của miếng dán là có thể thay miếng mới
- Bỏ miếng dán cũ và thay miếng dán mới sau khi tẩy trang
- Thời gian sử dụng: Tối thiểu nên dùng 1 đợt 4-7 ngày hoặc tối ưu nhất là nên sử dụng cho đến khi da mụn lành.

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HIMOM band premium spot:

1. Hoạt chất mới Hydrocolloid có nhiều nghiên cứu trên thế giới về vai trò tạo môi trường ẩm, giúp nhanh liền thương, giảm đau, hút dịch tiết, hạn chế thâm.
2. Dạng bào chế liên tiến: hoạt chất được đưa vào miếng dán trong suốt Polyurethane - Không thấm nước mà vẫn thoáng khí, cho phép chơi thể thao, tắm, bơi thoải mái mà không lo thấm nước, mồ hôi.
3. Là Miếng dán tạo môi trường ẩm duy nhất trên thị trường có bổ sung Aloe vera.
4. HIMOM band premium Spot mang lại cảm giác như không dán, do được thiết kế rất mỏng và mềm.

Công ty sở hữu: **JV Pharmaceutical Corporation**

Nhập khẩu, phân phối độc quyền tại Việt Nam: Công ty cổ phần Traphaco

☎ 1800 6612

🌐 [Traphacoshop.com](http://Traphacoshop.com)

🌐 [www.traphacoshop.com](http://www.traphacoshop.com)