

## 1. Mô tả

- Betaplast F là loại băng vết thương thấm hút làm từ polyurethane.
- Betaplast F phù hợp để điều trị các vết thương có dịch tiết từ mức độ trung bình đến nhiều.
- Betaplast F hấp thụ dịch tiết từ vết thương và kích thích sự lành vết thương trong khi vẫn duy trì môi trường ẩm thuận lợi cho quá trình lành vết thương so với điều kiện khô thông thường.
- Betaplast F tạo tốc độ truyền hơi ẩm trung bình (MVTR)
- Betaplast F tạo tốc độ truyền hơi ẩm trung bình (MVTR) giúp da thoáng khí và tránh nhiễm khuẩn.

## 2. Chỉ định

- ① Loét (tĩnh mạch, động mạch, do tiểu đường)
- ② Loét tỳ đè
- ③ Các vết bỏng nhỏ
- ④ Vị trí cho da (sau khi cầm máu)
- ⑤ Vết thương lên mô hạt
- ⑥ Vết mổ ngoại khoa
- ⑦ Vết cắt bỏ ngoại khoa

## 3. Hướng dẫn sử dụng

- ① Làm sạch vết thương trước khi dùng miếng dán
- ② Tháo lớp phim trong suốt bên trong và đặt miếng Betaplast F lên vết thương
- ③ Ấn nhẹ nhàng miếng dán để bảo vệ vết thương

## 4. Thận trọng

- Chỉ sử dụng một lần.
- Ngừng sử dụng nếu xảy ra hiện tượng đỏ hoặc mẫn cảm.
- Không sử dụng nếu bao bì hoặc túi bị rách.

## 5. Hạn dùng:

- 3 năm kể từ ngày sản xuất.

## 6. Điều kiện bảo quản và vận chuyển

- Bảo quản nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng.
- Tránh nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao.

## 7. Tác dụng có hại

- Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo tác dụng có hại của sản phẩm.

## Quy cách đóng gói:

- Hộp 10 miếng kích thước 5cm x 10cm x 0,2cm. Hoặc hộp 10 miếng kích thước 5cm x 20 cm x 0,2cm.

**Số lô, HD:** xin xem **LOT**  trên bao bì.

**NSX:** 3 năm trước ngày hết hạn in trên bao bì.

**Nhà sản xuất:** GENEWEL CO., LTD.  
281-2, Soltaesangdu-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

**Nhà nhập khẩu:** Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á. Lô A2-CN3, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

™: BETAplast là nhãn hiệu đã được đăng ký của Mundipharma.

