

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nước mắt nhân tạo ZIXOL

1. Nhận dạng, thành phần và mục đích sử dụng

Thiết bị y tế - Nước mắt nhân tạo Zixol là một dung dịch vô trùng không chứa chất bảo quản để sử dụng cho nhãn khoa, là chất thay thế nước mắt đẳng trương, độ trong suốt và độ nhớt của nó đảm bảo sự thoải mái tối đa khi sử dụng. Zixol được chỉ định để bảo vệ giác mạc.

Ngoài chứa axit hyaluronic như một chất sinh lý và bôi trơn, Zixol còn chứa kẽm sulfat vốn đã có trong mô mắt ở nồng độ cao.

Hoạt động dưỡng ẩm kết hợp của axit Hyaluronic và kẽm sulfat có lợi trong việc làm ẩm và bôi trơn bề mặt mắt trong trường hợp khô mắt do một số yếu tố như: căng thẳng, gió, khói bụi, ánh sáng nhân tạo khắc nghiệt, sử dụng VDUs, sử dụng kính áp tròng, lái xe nhiều giờ, thay đổi chấn thương không do bệnh lý, khoảng thời gian sau các thủ thuật với laser excimer, đục thủy tinh thể và các tình huống thay đổi chức năng nước mắt bình thường khác.

Zixol có thể sử dụng như một chất bổ trợ của quá trình hydrat hóa trong quá trình điều trị chống dị ứng

1.1 Thành phần

Trong 100 ml dung dịch chứa: Natri clorua 0.8g, Natri xitrat tribasic dihydrat 0.2g, axit hyaluronic 0.15g, Kẽm sulfat heptahydrat 0.035g, axit xitric 0.003g, nước tinh khiết vừa đủ.

1.2 Mục đích sử dụng:

- Zixol được chỉ định để làm giảm các triệu chứng khô mắt, ở dạng vừa phải, do cả nguyên nhân bên ngoài và bên trong.

- Zixol còn được chỉ định sau các can thiệp phẫu thuật và đặc biệt là phẫu thuật khúc xạ, chẳng hạn như phẫu thuật cắt bỏ giác mạc (PRK hoặc laser excimer) vì có tác dụng hỗ trợ quá trình sinh lý sửa chữa mắt và tái biểu mô mắt (khi diễn ra tổng hợp gân sụn cần thiết cho quá trình làm lành vết thương).

- Zixol được chỉ định để sử dụng chung với cả kính áp tròng mềm và cứng.

- Zixol được chỉ định để sử dụng thường xuyên và kéo dài. Sản phẩm có thể được sử dụng vào ban ngày hoặc thay thế trước khi đi ngủ (sử dụng ban đêm).

2. Quy cách đóng gói

- Quy cách 1: Hộp gồm 1 lọ 8 ml

- Quy cách 2: Hộp 20 tép x 0,6 ml

3. Hướng dẫn sử dụng

• Trước khi dùng sản phẩm, loại bỏ nắp bảo vệ.

• Lật ngược lọ và ấn nhẹ vào thân lọ để rỏ 1 giọt vào mỗi mắt, trừ khi có quy định khác, chú ý nhỏ xuống mí mắt dưới. Sau khi nhỏ thuốc, sản phẩm sẽ được phân bố đều trong mắt, tạo ra một lớp màng dưỡng ẩm bảo vệ trên bề mặt mắt. Sau khi nhỏ thuốc vào mắt, thị lực sẽ trở lại bình thường sau vài phút. Các giọt tạo ra bởi trọng lực được xác định trước, chính xác bởi hình dạng của lỗ thiết bị.

• Do các đặc tính đặc biệt của lọ với ống nhỏ giọt cho các dung dịch không có chất bảo quản nên khi lọ gần hết thì cần phải ấn mạnh hơn để tạo ra một áp lực lớn để sản phẩm thoát ra ngoài.

• Rỏ thuốc xong phải đóng chai lại ngay lập tức với nắp phù hợp.

• Sản phẩm phải được sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp.

• Với dạng tép, sau khi vặn nắp và sử dụng thì quay ngược đầu tép để đóng lại. Với dạng tép thì sử dụng trong vòng 24h sau khi mở nắp để đạt được hiệu quả tốt nhất.

4. Chống chỉ định

• Không sử dụng sản phẩm nếu sản phẩm không được đóng hoàn toàn và / hoặc không còn nguyên vẹn.

• Không làm xáo trộn hoặc làm hỏng lọ và các cơ chế của nó. Không nhấn lọ khi đang có nắp đóng.

• Trong khi nhỏ thuốc không chạm đầu nhỏ thuốc vào mắt hoặc các bề mặt khác.

• Không sử dụng sản phẩm trong trường hợp cơ thể dị ứng hoặc có tiền sử phản ứng với một thành phần của sản phẩm.

• Nếu có triệu chứng không bình thường trong quá trình sử dụng thì phải ngừng điều trị ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

• Không sử dụng sản phẩm sau ngày hết hạn.

• Để xa tầm tay trẻ em.

5. Bảo quản

Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 25°C

Manufacture: Oftalpharma S.r.l, Via Di Gonfienti 5/c/59 Prato, Italy

Thương nhân nhập khẩu và phân phối:

Công ty TNHH Thương mại Trí Khang

Địa chỉ: LK 03-07, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

SĐT: 024.625.41100 Hotline: 096.913.8181

Website: trikhangpharma.com