



## CURIOSIN® Gel • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### CURIOSIN® Gel LÀ GÌ?

CURIOSIN® Gel là một loại gel dùng cho da và vết thương trong suốt, không màu, không làm bẩn da và quần áo. Thành phần chủ yếu của CURIOSIN® Gel là **Hyaluronate Kẽm**. Ngoài ra CURIOSIN® Gel còn chứa các chất khác là: carbomera (chất tạo gel), Kali sorbat (chất bảo quản), nước cất pha tiêm. Các chỉ tiêu vi sinh của CURIOSIN® Gel đáp ứng được các tiêu chuẩn châu Âu. CURIOSIN® Gel có nhiều dạng đóng gói với định lượng khác nhau (1,5 g, 30 g, 50 g).

Thành phần chính của CURIOSIN® Gel, hyaluronan, là một chất cơ bản của da và các mô liên kết. Chất này có vai trò giữ cho da được nguyên vẹn, tái tạo da sau tổn thương. Hyaluronate Kẽm là một dạng phức chất của hyaluronan còn có thêm những lợi ích vượt trội khác.

### CURIOSIN® Gel TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

CURIOSIN® Gel giúp làm lành da bị tổn thương bằng quá trình làm lành da chủ yếu hoặc thứ yếu: cung cấp môi trường vi mô cần thiết, ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi sinh vật từ môi trường bên ngoài (qua tiếp xúc hoặc từ không khí) vào nơi tổn thương. CURIOSIN® Gel cũng hỗ trợ trong việc làm giảm tình trạng viêm, đau ở nơi bị tổn thương; giúp phục hồi da tổn thương trở lại tình trạng và hình dạng ban đầu.

### CURIOSIN® Gel ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Khôi phục và bảo vệ vùng da bị bệnh hoặc bị tổn thương và hỗ trợ làm lành vết thương cấp và mãn tính như các vết loét ở chân, loét điểm tỳ, loét do bệnh tiểu đường v.v....

### CURIOSIN® Gel được dùng cho các trường hợp:

– Da bị tổn thương (như kích ứng do bức xạ, da khô, da tróc vẩy).

– Những vết thương bề mặt như những vết thương do chấn thương nhẹ (như trầy, xước, hay các vết cắt), phỏng nhẹ (phỏng độ 1 và độ 2).

– Mụn trứng cá, thể nhẹ và vừa.

### Dưới sự theo dõi của chuyên gia y tế:

– Những vết thương mãn tính như loét chân do các nguyên nhân khác nhau và do nằm bất động một chỗ lâu.

### DÙNG CURIOSIN® Gel NHƯ THẾ NÀO?

CURIOSIN® Gel chỉ được dùng ngoài da!

### *Da bị tổn thương hoặc bị bệnh ngoài da:*

làm sạch bề mặt da bằng nước và bôi một lớp mỏng CURIOSIN® Gel. Có thể dùng lặp lại.

### *Các vết thương do chấn thương nhẹ:*

Rửa sạch vết thương bằng nước hoặc nước muối sinh lý, đợi cho đến khi cầm máu, rồi bôi một lớp CURIOSIN® Gel dày khoảng 1 mm lên bề mặt vết thương. Có thể để cho CURIOSIN® Gel tự khô trên mặt vết thương, hoặc băng vết thương bằng gạc không dính rồi dán lại bằng băng keo y tế.

Có thể dùng CURIOSIN® Gel với liều lặp lại.

### *Bỏng nhẹ:*

làm mát bề mặt bị bỏng dưới vòi nước lạnh, rồi dùng CURIOSIN® Gel như hướng dẫn ở phần trên.

### *Các vết thương lâu ngày (như vết loét ở chân, loét điểm tỳ, loét do bệnh tiểu đường v.v...)*

Cần phải tham vấn chuyên viên y tế trước khi dùng CURIOSIN® Gel, cũng như trong thời gian điều trị các vết thương lâu ngày bằng sản phẩm này. Chuyên viên y tế sẽ theo dõi và hướng dẫn cách kết hợp CURIOSIN® trong phác đồ điều trị phối hợp. Nếu cần nhân viên y tế phải làm sạch ổ nhiễm trùng, và rửa nhẹ nhàng vùng da bị tổn thương bằng nước hoặc nước muối sinh lý rồi đợi đến khi cầm máu. Sau khi vết thương đã được xử lý đúng cách, thì bắt đầu dùng CURIOSIN® Gel như hướng dẫn ở trên.





## CURIOSIN® Gel CÓ THỂ GÂY RA NHỮNG TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN GÌ?

Các tác dụng không mong muốn sau đây đôi khi có thể xuất hiện vào lúc khởi đầu dùng CURIOSIN® Gel: đỏ da, cảm giác bỏng rát hoặc như kim châm nhưng nhẹ và chỉ thoáng qua, đau tại nơi bôi. Hãy tham vấn chuyên viên y tế nếu có bất kỳ tác dụng không mong muốn nào xảy ra với bạn; như xuất hiện tình trạng viêm da, đỏ da, ngứa dai dẳng, dấu hiệu nhiễm trùng, không thấy dấu hiệu lành vết thương sau vài ngày điều trị.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, có báo cáo về các tác dụng không mong muốn sau đây, nhưng hiếm: tăng tạo mô hạt và hoại tử một phần nhưng chỉ xảy ra trên diện tích rất nhỏ của vết thương; tuy nhiên, chưa khẳng định có liên quan với việc sử dụng CURIOSIN® Gel hay không.

## KHI NÀO THÌ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CURIOSIN® Gel?

Không dùng CURIOSIN® Gel nếu bạn quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào có trong sản phẩm này, hoặc với các protein của chim (gà trống).

## CÁC HƯỚNG DẪN KHÁC

**Bảo quản ở nhiệt độ từ 5°C đến 30°C.**

Giữ sản phẩm ngoài tầm với, tầm nhìn của trẻ.

Trước khi bắt đầu dùng, kiểm tra xem sản phẩm có còn nguyên niêm phong không. Sau mỗi lần dùng, cần đậy nút thật chặt. Không dùng những sản phẩm đã hết hạn sử dụng.

Không để đầu ống tiếp xúc với vết thương hoặc bất cứ vật gì khác; cần thận trọng để tránh mọi khả năng làm sản phẩm bị hư hay nhiễm khuẩn.

CURIOSIN® Gel được bán dưới dạng nhiều tuýp có định lượng khác nhau, nhưng 1 ống chỉ dùng cho 1 người.


## TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA NHÀ SẢN XUẤT:

Gedeon Richter Plc.  
H-1103 Budapest, Hungary  
Gyömrői út 19-21  
Tel. 36-1-431-4000  
Fax. 36-1-261-2166

## NGÀY BIÊN SOẠN VÀ CẬP NHẬT TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tháng 7, năm 2009

Số sáng chế châu Âu: EP 413016.

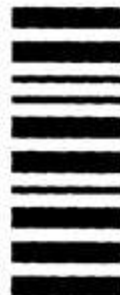

**CE** 0483 RG 1846, K-6443-1.4, 29149500

 **GEDEON RICHTER**

