

URGO MOUTH ULCERS, Hương vị trái cây, filmogel®

Thành phần:

Dẫn xuất Cellulose (Chất hình thành lớp màng), Alcohol (Chất hòa tan), Acid Carboxylics & Acid Mineral (Chất ester hóa), Nước cất (Tá dược), Chất tạo mùi, Sucralose (Chất làm ngọt)

Mô tả: Gel màu nâu cam có mùi trái cây đặc trưng.

Qui cách đóng gói: 1 lọ/ 1 hộp; Thể tích thực: 6 ml/ lọ

Đặc tính: Urgo Mouth Ulcers dạng gel, khi tiếp xúc với niêm mạc miệng sẽ hình thành lớp màng mềm và mịn, có tác dụng:

- Bảo vệ vết thương trong miệng khỏi các tác động từ bên ngoài (thức ăn, răng giả...) suốt 4 giờ.
- Giảm đau
- Thúc đẩy lành thương.

Chỉ định: Dùng để bôi vào các vết loét và các vết thương nhỏ trong miệng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Quét một mặt của dụng cụ bôi lên trên mép chai. Quét mặt còn lại của dụng cụ bôi lên vết thương để che phủ khu vực cần điều trị.
- Để khô khoảng 10 giây rồi ngậm miệng lại. Một lớp màng hữu hình được hình thành trên bề mặt vết thương. Nếu vết thương chưa được bao phủ toàn bộ, cần lặp lại việc bôi gel lên vết thương một lần nữa.
- Bôi gel lên vết thương 4 lần/ ngày, tốt nhất bôi trước bữa ăn, cho đến khi vết thương liền lại hoàn toàn (3 tới 5 ngày).
- Khi mà lớp màng còn nhìn thấy được, không cần thiết thực hiện việc bôi gel lần nữa.
- Thành phần của sản phẩm bảo đảm tính vệ sinh. Do đó, không cần thiết phải lau dụng cụ bôi sau khi sử dụng.

Không sử dụng trong các trường hợp sau:

- Không sử dụng sản phẩm này nếu vết loét tại miệng có kích thước lớn (đường kính > 1cm) hoặc các vết loét miệng kiểu herpes (khu vực có nhiều vết loét miệng nhỏ), với những trường hợp này cần phải hỏi ý kiến bác sĩ.
- Không sử dụng sản phẩm này tại các vết thương nhiễm khuẩn, các vết bỏng hoặc vết thương sâu (vết thương chảy máu).

- Không sử dụng trong trường hợp dị ứng với dẫn xuất của salicylic
- Không khuyến cáo sử dụng sản phẩm cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thận trọng:

- Luôn đóng chặt nắp sau mỗi lần sử dụng
- Khuyến cáo sử dụng hết sản phẩm trong vòng 6 tháng kể từ ngày mở nắp
- Sản phẩm này chỉ sử dụng tại màng nhày ở khoang miệng.
- Có thể gây ra cảm giác hơi khó chịu tạm thời hoặc hơi ngứa.
- Không sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Không được phá bỏ màng film sau khi đã được hình thành, lớp màng này sau đó sẽ tự động biến mất.
- Không hút thuốc trong khi đang sử dụng sản phẩm: Trước khi bôi gel hoặc lại gần chai thuốc đang mở nắp.
- Trường hợp loét ở miệng lan ra khi đeo hàm răng giả thì cũng có thể bôi thuốc nếu như thuốc không bị hàm răng giả bao phủ lên
- Không được uống
- Nếu không có sự cải thiện sau 5 ngày sử dụng, cần hỏi ý kiến bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Nếu nghi ngờ, hỏi ý kiến dược sĩ.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C. Không được sử dụng sau ngày hết hạn ghi trên vỏ hộp. Tránh xa nguồn lửa. Dễ cháy nổ.

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Xuất xứ: Pháp

Nhà sản xuất:

Laboratoires Urgo, 42 Rue de Longvic – 21300 Chenove - Pháp

Nhà nhập khẩu: Công Ty Cổ Phần Dược Liệu TW2

24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Dược Kim Đô

31/3-5 Phạm Phú Thứ, P.11, Quận Tân Bình, TP. HCM