

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

**Tên trang thiết bị y tế: KEM BÔI VẾT THƯƠNG**

**Chủng loại: PALINGEN**

Thành phần : Collagen thủy phân, Poliesameten Biguanide (Polyhexanide, PHMB), Disodium EDTA, Acid B-glycyrrhetic (Enoxolone), Bisabolol, Proline, Hydroproline, Arginine, Glycerin, Vitamin E, Chiết xuất cỏ đuôi ngựa, Chiết xuất cây mã đề, Bột chiết xuất lô hội, Tinh dầu đinh hương, Tinh dầu hoa phong lữ, tá dược vừa đủ.

**Liều lượng và cách dùng:**

Bôi ngày 2 lần. Nên có sự giám sát y tế nếu sử dụng liên tục trên 15 ngày.

Rửa tay sạch rồi bôi một lớp kem mỏng lên bề mặt và xung quanh vết thương trên da.

**Sản phẩm được chỉ định dùng để:**

- Diệt mầm bệnh ở các vết thương, vết loét trên da. Nhiễm trùng ở cơ quan sinh dục ngoài.
- Ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở các vết thương, vết thương sau phẫu thuật, vết loét trên da.
- Thúc đẩy quá trình chữa lành ở các vết thương, vết thương sau phẫu thuật, vết loét, loét tĩnh mạch, loét do tì đè, bỏng nhẹ và trầy xước (sau trị liệu bằng laser, liệu pháp áp lạnh) và tái tạo biểu mô.
- Giảm hình thành sẹo do các vết thương, vết thương sau phẫu thuật vết loét, loét tĩnh mạch, loét do tì đè, bỏng nhẹ và trầy xước (sau trị liệu bằng laser, liệu pháp áp lạnh, lãn kim)
- Da bị phát ban, kích ứng, cháy nắng, hăm tã, mềm ướt.
- Trị, nứt hậu môn.
- Làm dịu da và chống mẫn đỏ.

**Chống chỉ định:**

Không sử dụng cho những người quá mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm.

Sản phẩm không ảnh hưởng đến việc lái xe và sử dụng máy móc.

Không có chống chỉ định nào được biết đến với việc sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai.

**Tác dụng phụ:** Chưa có tác dụng phụ nào được ghi nhận.



**Cảnh báo và thận trọng:**

Sản phẩm này chỉ dùng bên ngoài.

Trong trường hợp có phản ứng bất lợi, ngưng sử dụng sản phẩm và hỏi ý kiến bác sĩ.

Không sử dụng sản phẩm đã hết hạn hoặc sau sáu tháng kể từ ngày mở nắp.

Để xa tầm tay trẻ em.

Poliesametylenbiguanide (PHMB) được xem là một chất gây dị ứng tiếp xúc hiếm gặp, với độ nhạy ở mức 0,5% trong quần thể ngẫu nhiên. Ngừng sử dụng ngay lập tức nếu có triệu chứng viêm da dị ứng.

**Bảo quản:** Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ khoảng 25 độ C, tránh xa nguồn nhiệt.

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**  
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký



GIÁM ĐỐC  
DS. Nguyễn Văn Huy